


# 1




## 1 Maßnahmen

Die richtige Größe finden → Die passende Größe zum Umfang

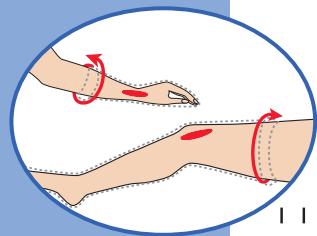

# 2

## 2 Anwendung

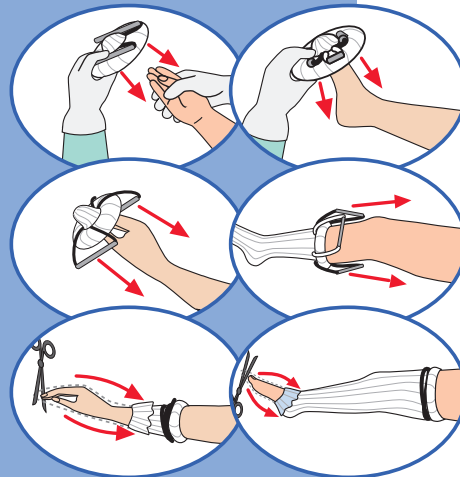

HemaClear über den Finger oder Zeh **rollen**

Die Griffe nach oben **ziehen**, bis zu der Stelle, wo sich normalerweise der unterste Teil des Tourniquets befindet

**Untersten Teil abschneiden:** Die Operationsfläche freilegen und den untersten Streifen abschneiden

**\* HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG AM BEIN**

Mit dem unteren Griff über die Ferse ziehen

Die Streifen festziehen, um Stabilität zu gewährleisten




**Anlegen des Tourniquets:** Rekordzeit für das Anlegen eines Tourniquets

# 3

## 3 Entfernen

**Aufschneiden nach der Operation:** Aus Sicherheitsgründen immer die **Schutzkarte** zwischen Kompressionstrumpf und Tourniquet legen

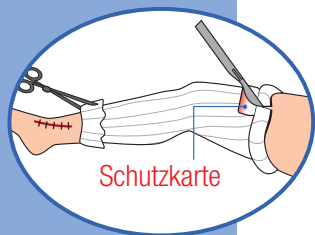

**Entfernen des Tourniquets:** Rekordzeit für die Verwendung eines Tourniquets

### Gegenanzeigen:

HemaClear sollte nicht länger als 120 Minuten am Gliedmaßen des Patienten befestigt werden.

HemaClear nicht bei Patienten mit schlechter Durchblutung, Ödemen oder Thrombosen verwenden.

HemaClear nicht direkt am Nervus ulnaris (am Ellbogen) oder am Nerv peroneus (am proximalen Tibia).

HemaClear nicht an Gliedmaßen befestigen, die deutliche Hautveränderungen aufweisen (Hautkrankheiten, Verbrennungen).

HemaClear nicht an Gliedmaßen befestigen, die infiziert oder bösartige Veränderungen aufweisen.



**Anlegen des Tourniquets:**



**Entfernen des Tourniquets:**

