



1

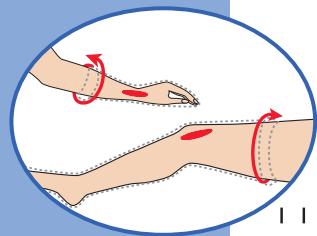


1 Mesure

Trouvez la bonne taille → Mesurez la circonférence du membre au lieu où s'est produite l'occlusion

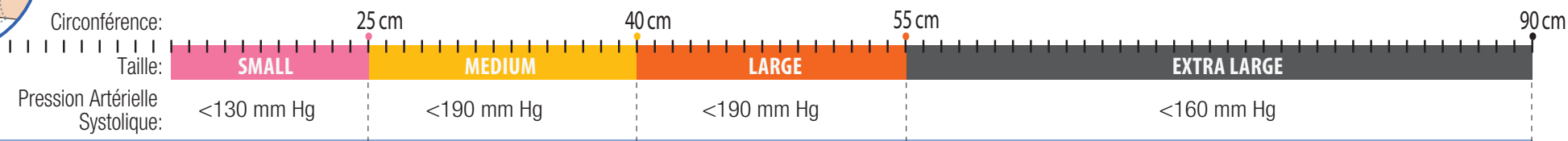

2

2 Emploi

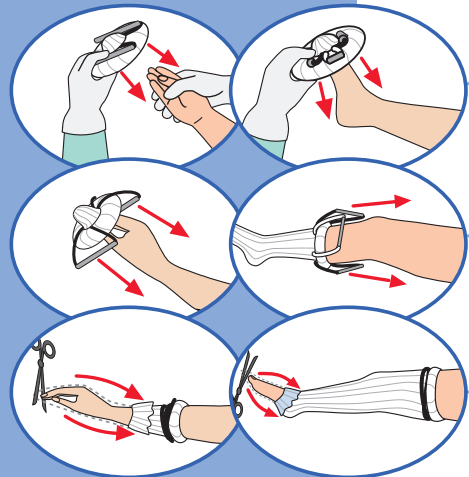


Roulez HemaClear à travers les doigts ou les orteils

Tirez les poignées, en vous arrêtant ou vous venez de placer le haut du manchon

Coupez la prise: coupez les cordons • exposez la région chirurgicale

* CONSEILS POUR L'APPLICATION À LA JAMBE

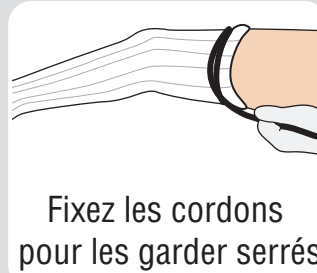


Application Accomplie: enregistrez le temps de début

3

3 Enlèvement

Coupez lorsque vous avez terminé: pour votre sécurité, placez toujours la **carte de protection** entre le maillot et le garrot

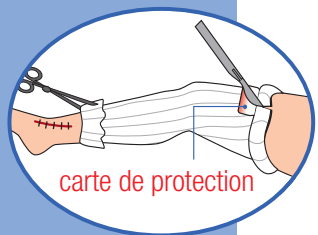

Enlèvement Accompli: enregistrez le temps totale depuis le début

Contre-indications:

- Ne pas laisser HemaClear sur le membre du patient plus de 120 minutes.
- Ne pas utiliser HemaClear avec les patients ayant une mauvaise circulation périphérique, un œdème, ou une Thrombose Veineuse Profonde.
- Ne pas positionner HemaClear directement sur le nerf ulnaire (la région du coude) ou sur le nerf péronier (à la partie proximale du tibia).
- Ne pas utiliser HemaClear si le membre a subi des lésions cutanées considérables (à cause des maladies cutanées, des brûlures).
- Ne pas utiliser HemaClear si le membre est infecté ou malin.



Application Accomplie:



Enlèvement Accompli:

